


cyto UNITED QUALITIES
OF PATHOLOGY
pathos

Návod na použitie pre Corotest IVTM

(inhibitive virological transport medium)

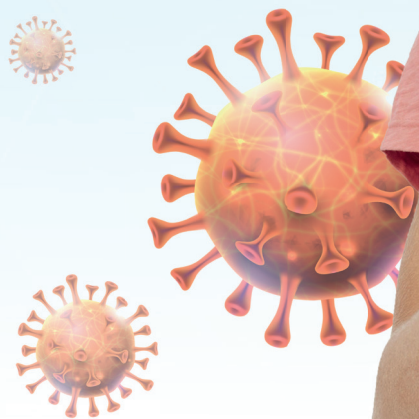

Inštruktážne video ku kloktacím testom



CYTOPATHOS, spol. s r.o.

Kutuzovova 23, 831 03, Bratislava 3

☎ 0907 665 035, ✉ covid19@cytopathos.sk,

🌐 www.cytopathos.sk

SARS – Cov – 2 je skratka pre **Koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm** (*angl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*).

Spôsobuje respiračné ochorenie **COVID-19** (COronaVirus Disease), ktoré sa rozšírilo na globálnu pandémiu.

ŠÍRENIE A PRENOS:

Koronavírusy sa šíria predovšetkým blízky kontaktom, zvlášť **kvapôčkovou infekciou** pri kašli a kýchaní, potravinami a telesnými tekutinami. Významný je aj **prenos kontaktom** s kontaminovanými predmetmi, na ktorých pretrváva aj niekoľko dní. K prenosu kontaktom môže dôjsť, keď sa zdravý jedinec dotkne vírusom kontaminovaného povrchu alebo predmetu a následne sa dotkne úst, nosa alebo očí.

PRÍZNAKY OCHORENIA:

Medzi príznaky ochorenia COVID-19 patrí zvyčajne horúčka, kašeľ, bolesti v krku, bolesť svalov, dýchavičnosť, únava, nevoľnosť, strata čuchu a chuti do jedla. U 97,5 % ľudí, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID19, sa tak stalo do 11,5 dňa od nakazenia, čím sa zavedenie 14-dňovej karantény potvrdilo ako opodstatnené.

PREVENCIA INFEKCIE KORONAVÍRUSOM

R – O – R (*ruky – odstup – rúško*)

- dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu, najmenej po dobu 20 sekúnd,
- nosenie tvárových rúšok,
- dezinfekcia povrchov,
- vyhýbanie sa blízkeho kontaktu s ľuďmi a dodržiavanie dostatočnej vzdialenosti aspoň 2 metre, vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí,
- používanie jednorazových papierových vreckoviek pri kýchaní a kašľaní a ich následné zahodenie, prípadne kýchanie a kašľanie do lakťovej jamky, nie do dlane,
- karanténne opatrenia a obmedzenia pohybu osôb, s dôrazom na najrizikovejšiu staršiu populáciu



PCR KLOKTACÍ TEST:

Kloktanie ako spôsob získania biologického materiálu je porovnateľné s výterom z nosohltana a hrdla. Odobraté vzorky sa vyhodnocujú na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 rovnako ako pri vyšetrení z výteru. Izolujú sa nukleové kyseliny a pomocou RT-PCR sa zistí prítomnosť alebo neprítomnosť vírusu. Výplach ústnej dutiny a hltana kloktaním je veľmi spoľahlivý spôsob odberu vzorky samotným pacientom. Podľa dostupných údajov sa výsledky štatisticky nelíšia a je funkčne porovnateľný s výterom.

Test je vhodný od veku 10 rokov (za predpokladu, že dieťa dokáže vykonať úkon kloktania).

POSTUP PRI PCR POZITÍVOM VÝSLEDKU TESTU:

1. oznámiť informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dospelých)
2. oznámiť informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dni pred odberom kloktaním (alebo 2 dni pred nástupom vašich príznakov)
3. požiadajte ich, aby sa prihlásili na testovanie prostredníctvom web-stránky [korona.gov.sk](https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php) link: **<https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php>**
4. ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte call centrum NCZI 02/32 35 30 30 alebo príslušný RÚVZ v SR.
5. **Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII** minimálne **10 dní** od zistenia positivity PCR aj napriek tomu, že máte bezpríznakový priebeh ochorenia. Izolácia zabezpečí oddelenie chorých alebo infikovaných osôb od ostatných osôb a zabráni ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Návod na použitie pre Corotest IVTM

(inhibitive virological transport medium)

cyto
pathos

Inštruktážne video ku kloktacím testom nájdete na www.covidtesty.sk

Corotest IVTM slúži k transportu vzorky po odbere klinického materiálu pre diagnostiku respiračných vírusov.

Odber je najlepšie vykonať ráno, nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, či inej dezinfekcie, ktoré môžu skresľovať laboratórne vyšetrenie. Podobný efekt môžu spôsobovať niektoré zubné pasty.

1. Odlomíme uzáver PVC ampulky s roztokom na výplach (**Aqua 5ml**) (obr. A)

2. Stlačením ampuly vylejeme roztok do úst a so zaklonenou hlavou vykloktáme hrdlo po dobu asi 30 sekúnd (obr. B). *Prípadné prehltnutie roztoku (Aqua pro injectione – sterilná voda) nespôsobí žiadne ťažkosti.*

3. Cez priloženú slamku vyprázdňime ústa do prázdnej skúmavky s **modrým** uzáverom. (obr. C)

4. Naplnenú (modrú) skúmavku prelejeme do nádobky s **červeným** uzáverom, ktorá obsahuje virologické médium (pozor nevylietať!) a nádobku uzavrieme. (obr. D)

5. Pre každého testovaného sú priložené 2 rovnaké štítky s menom testovanej osoby. Prvý štítok nalepíme na nádobku s červeným uzáverom a druhý štítok nalepíme na priložený Zoznam žiakov.


6. Označenú a dobre uzavretú nádobku s červeným uzáverom vložíme do priloženého uzatvárateľného vrecka a pripravíme na odoslanie k laboratórnemu vyšetreniu.

7. Ostatný použitý materiál likvidujeme ako nebezpečný odpad v separátnom plastovom vreci, ktoré vyzdvihne personál laboratória po skončení testovania.


(obr. A)




(obr. B)

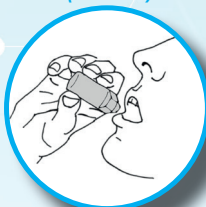

(obr. C)

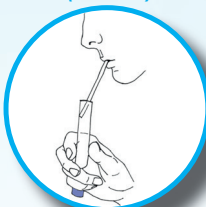

(obr. D)

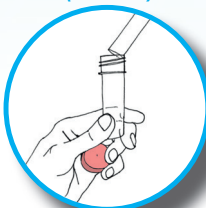

CYTOPATHOS, spol. s r.o.

Kutuzovova 23, 831 03, Bratislava 3

☎ 0907 665 035, ✉ covid19@cytopathos.sk,

🌐 www.cytopathos.sk